


DIRECT SYSTEM



Bio-Ästhetik und Funktion in einer Sitzung


edelweiss dentistry ist eine dentale Denkfabrik, die innovative Systemlösungen konzipiert und produziert, diese gemeinsam mit Partnern aus der Dentalindustrie entwickelt und über den Dentalfachhandel exklusiv vermarktet. Dabei steht die Verknüpfung von Inspiration und technischem Know-how im Vordergrund. VENEER & OCCLUSIONVD von edelweiss sind state of the art der modernen und minimal invasiven Zahnästhetik. Erstmals in der Dental-Geschichte ist es möglich geworden, vorgefertigte Veneers aus einem Nano-Hybrid Composite mit moderner Lasertechnologie zu bearbeiten. Noch nie war die natürliche Form und die jugendliche Luminanz eines Zahnes so einfach und perfekt in nur einer Sitzung direkt realisierbar. Der vielseitige Einsatzbereich gemeinsam mit der zeit- und kostensparenden Anwendung machen edelweiss VENEER & OCCLUSIONVD zur Investition für die Zukunft. Auch im Sinne des Patienten. Überzeugen Sie sich selbst.

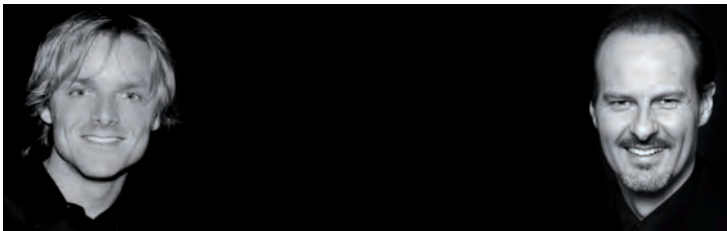

Stephan Lampi
CEO

Didier Dietschi
Senior Clinical and
Scientific Advisor

DIRECT SYSTEM

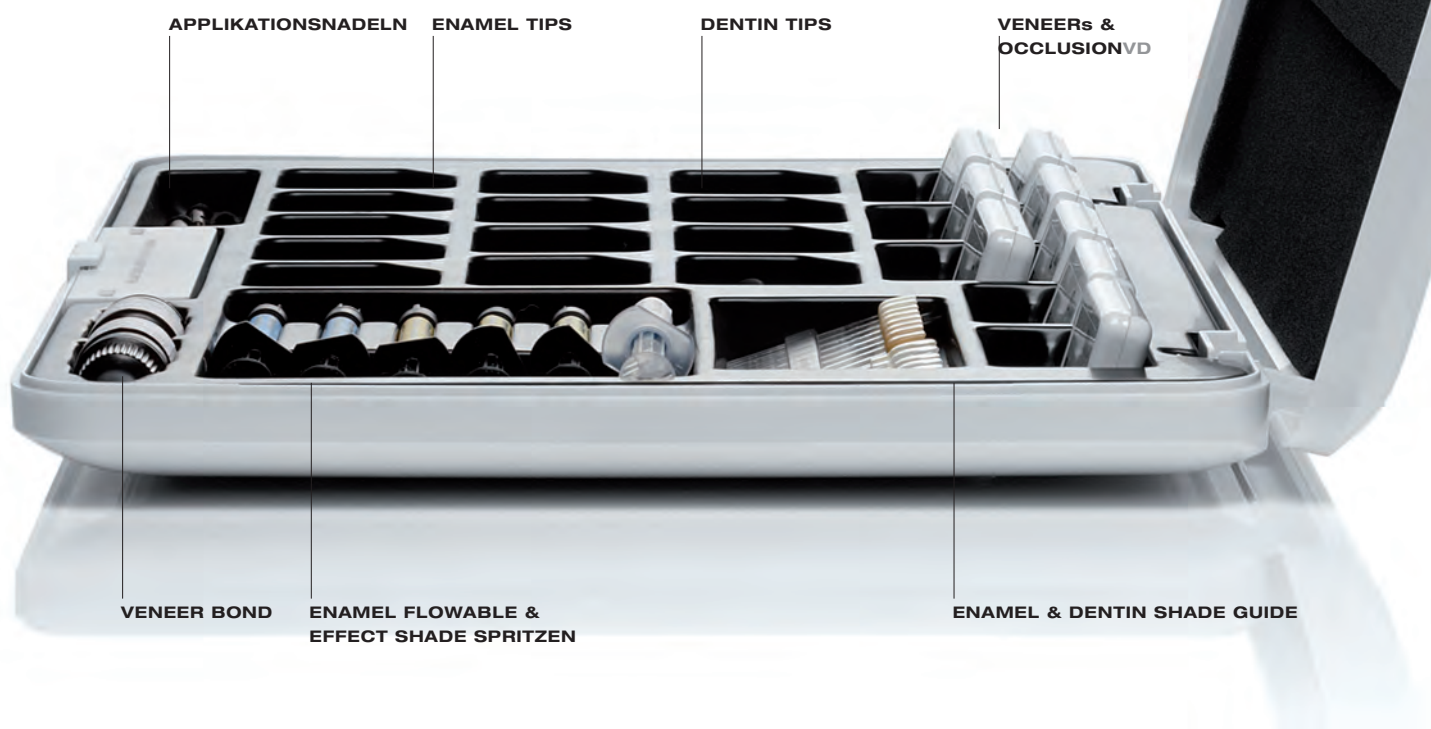

The Composition





YESTERDAY TODAY



www.edelweiss-dentistry.com/products/videos

VORTEILE

Eine Sitzung
Minimal invasiv
Natürlicher Look
Lange Lebensdauer
Biokompatibel
Kostenbewusst



INDIKATIONEN

Front- und Seitenzahnrestaurationen
Zahnverfärbungen
Anatomische Fehlbildungen
Diastema
Attrition
Semi- direkte und indirekte
Restaurationen
Kronenverblendungen

YESTERDAY
TODAY

a VENEER





YESTERDAY
TODAY



b COMPOSITE




The Progressive Technical Concept

edelweiss VENEER Durch den Laser-Bearbeitungsprozess wird das Beste aus zwei Welten vereint; homogene, anorganische und maximal glänzende Oberfläche, mit einem thermisch vergüteten und dynamischen Komposit-Kern. Somit wird eine optimale Integration in Funktion und Ästhetik erzielt. Diese Verarbeitungstechnologie wurde in Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Dr. Didier Dietschi, Univ. Genf entwickelt.

Cervikalbereich 0,2 mm

Faziale Fläche 0,6 mm

Inzisalkante 1,0 - 1,3 mm

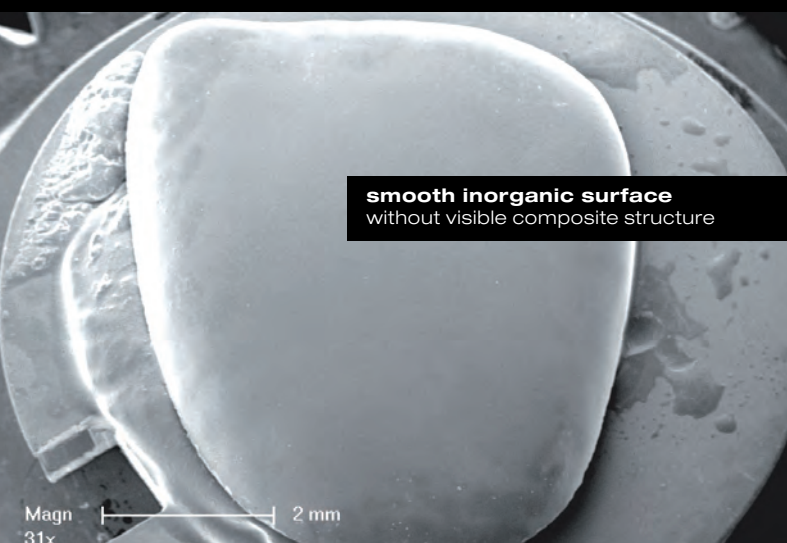

smooth inorganic surface
without visible composite structure

distinct layer of vitrified glass



laser sintered body

high composite density

Magn. 2000x | 100 µm

3 UPPER SIZES


Oberkiefer (S, M, L)

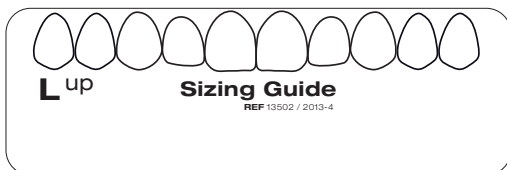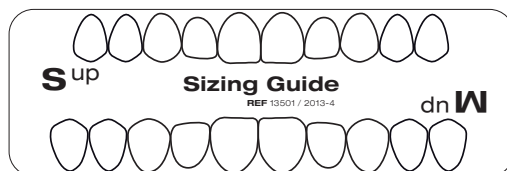

VENEER SIZES Durch Studium von Form und Grössenvariationen der natürlichen Zahnanatomie, haben wir vorgefertigte und dennoch modellierbare universal VENEER-Formen für die Oberkiefer- sowie Unterkieferfront in den folgenden Grössen entwickelt. (20 lower S/M 10x – 30 upper S/M/L 10x)

2 LOWER SIZES

Unterkiefer (S, M)

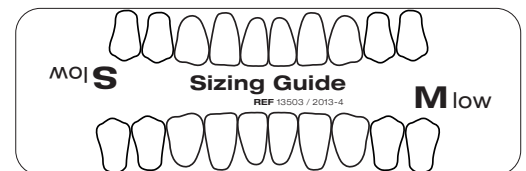

Die Auswahl der Zahnform erfolgt mit der Formschablone (edelweiss VENEER - Sizing Guide). Die Formschablone wird über die zu restaurierenden Zähne gelegt, wobei die auf der transparenten Folie sichtbaren Umrisse zur Auswahl des am besten passenden edelweiss VENEER dienen. Gleichzeitig können nötige Schliffkorrekturen auf der Folie eingezeichnet werden.



Natural Layering Technique

Das Konzept wurde 1995 von Prof. Dr. D. Dietschi vorgeschlagen, 1997 erstmals publiziert und basiert auf der Idee einer Synthese von Licht, Material und Farbe, die dem natürlichen Zahn entspricht.

edelweiss COMPOSITE ermöglicht den Wiederaufbau des Zahns mit zwei zahnähnlichen Grundmassen, welche mit Dentin und Schmelz verglichen werden können und als dessen Ersatz zu natürlichen Ergebnissen führt.

Die optischen Charakteristiken von natürlichem Dentin und Enamel wurden separat gemessen. Die daraus resultierenden Farb-Codes dienen uns als Referenz um das edelweiss COMPOSITE zu entwickeln. Ein Farbsystem, welches den gesamten Umfang der möglichen Zahnfarben umfasst.



5 DENTIN

Ein Opazitätsgrad – gleiche Farbe aber verschiedene Farbsättigungsstufen - Fluoreszenz. Von Dentin A0, für die Restauration gebleichter Zähne bis Dentin A3,5 für cervikale Restaurationen dunkler Zähne bei älteren Patienten.

Dentin Body-Massen weisen eine hohe Opazität und Fluoreszenz auf, welche den natürlichen Dentin-Nuancen entsprechen.



Dentin A0



Dentin A1



Dentin A2



Dentin A3



Dentin A3.5

1 ENAMEL

Enamel Shade intensiviert die Opaleszenz für alle optischen Variationen welche in natürlichen Zähnen existiert.

Basis Tönung:
Enamel



Enamel

edelweiss VENEER & COMPOSITE COLOR RANGE

edelweiss-shade / vita-shade



edelweiss VENEER SHADE

ENAMEL **VENEER** + DENTIN / ENAMEL

edelweiss VENEERS besitzen die Farbbezeichnung Enamel - Vita Enamel A0. Die jeweilige Dentin- oder Schmelzfarbe die zur Zementierung der edelweiss VENEER eingesetzt wird, bestimmt den finalen Farbton.

Bsp.: edelweiss VENEER (Vita enamel shade A0) mit der Dentinmasse A3 (Vita Dentin A3) zementiert, ergibt in Kombination die Farbe Vita A3. Wird das edelweiss VENEER mit der Enamelfarbe - Vita Enamel A0 kombiniert, ergibt diese Kombination die Vita Enamel Farbe A1.


ENAMEL VENEER

Farbe des edelweiss VENEER



FÜR HELBIGKEIT & MAXIMALE EINBLENDUNG DER NATÜRLICHEN ZAHNFARBE UND LUMINANZ

The Technical Aspects

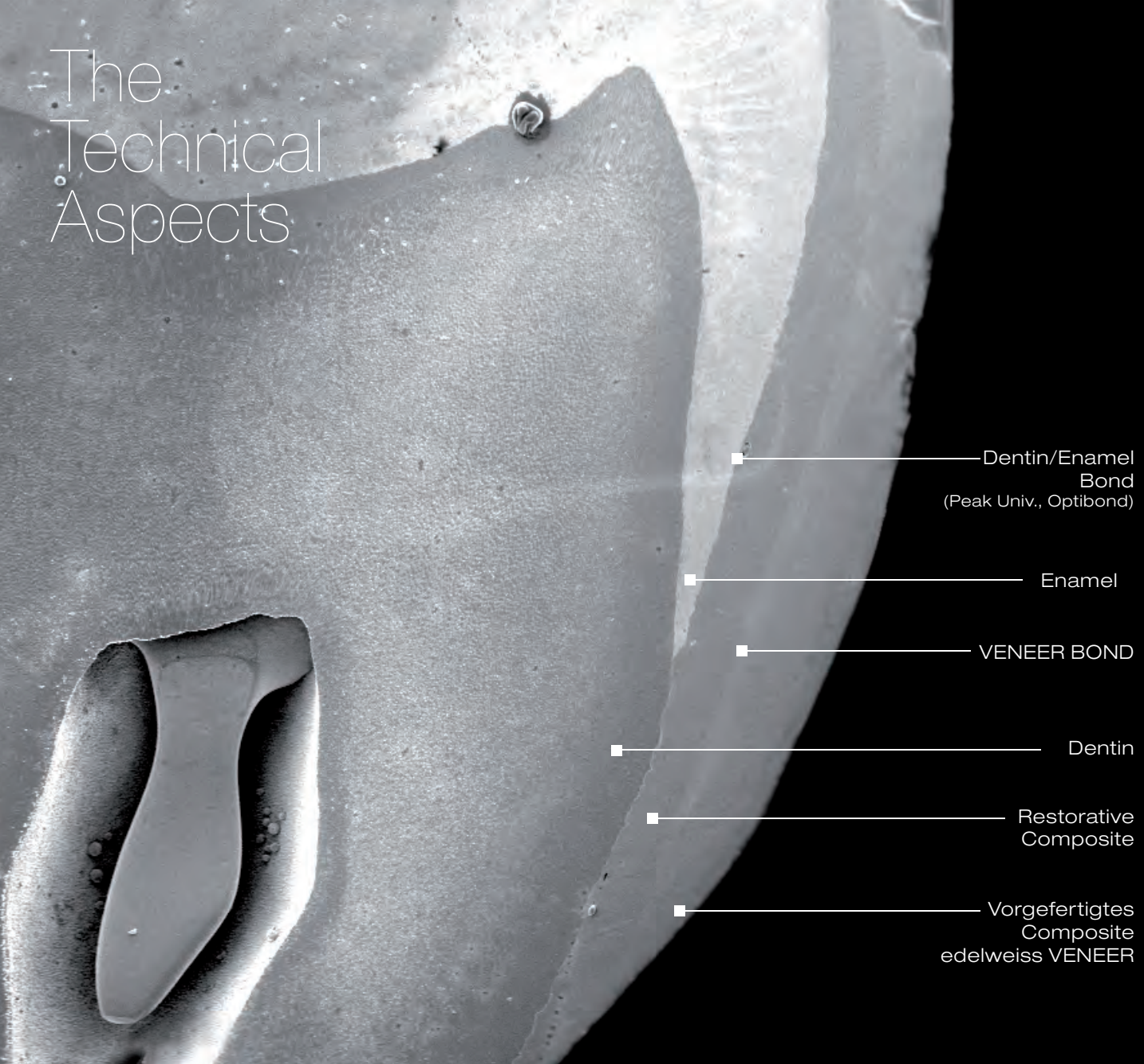


Aufnahme eines angeschnittenen menschlichen Molars mit einem zementierten vorfabrizierten Composite edelweiss VENEER, verbunden zur einen Hälfte mit der Schmelz-Oberfläche und zur anderen Hälfte mit der Dentin-Oberfläche.

Studie auf www.edelweiss-dentistry.com

Dauerfestigkeitsnachweis für Composite edelweiss VENEERS: Die in vitro Studie demonstrierte, dass vorfabrizierte Composite edelweiss VENEERS, zementiert auf Schmelz- und Dentinoberflächen von Molaren, den simulierten funktionellen Ermüdungs- und Belastbarkeitsmessungen effektiv stand hielten. Vor und nach der Messung wurden an beiden (Enamel- und Dentinrändern), welche üblicherweise den meist gefährdeten Bereich einer Restauration darstellen, praktisch keine Mängel vermerkt.

Die maßgeblichste Beobachtung wurde bei der Auswertung der inneren Adaption der Restauration erzielt. An der Übergangsfläche des Schmelzes sowie zwischen dem restaurativen Composite und dem edelweiss VENEER waren keine Mängel zu erkennen, was exzellente Verbindung, Stärke und Stabilität bei beiden Übergangsflächen (Dentin/Enamel – Composite und Composite – edelweiss VENEER) bestätigte.

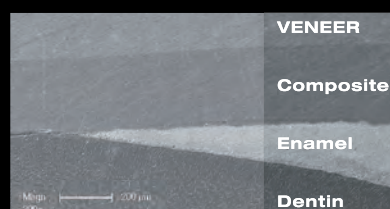


**Université
de Genève**

Prof. Dr. Didier Dietschi
D.M.D, PhD, Privat-Docent
Specialist SVPR
Associate. Professor


NANOPARTIKEL

(500 nm)

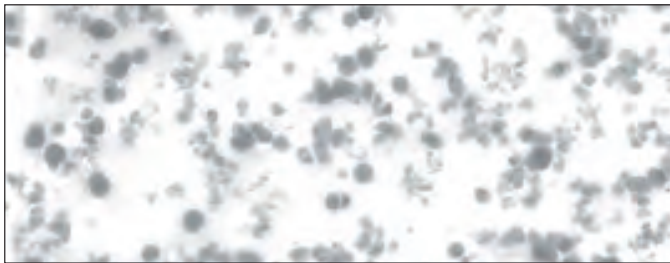

KIESELGEL

(500 nm)

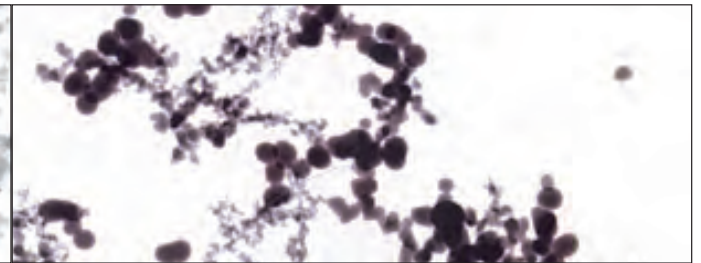

Das Nano-Hybrid Composite:

Füllstoffe mit Partikelgrößen im Nanometerbereich („Nanopartikel“) haben eine starke Tendenz sich nach der Herstellung wieder zusammenzulagern (Aggregation und Agglomeration). Sie erreichen dadurch nicht ihr volles Potential zur Eigenschaftsverbesserung zum Beispiel in Hinblick auf Schrumpf und Modul des Composites. Diese aggregierten bzw. agglomerierten Nanopartikel sind lange bekannt und werden seit vielen Jahren in Dentalmaterialien (Abformmassen, Composite) verwendet. Die technische Herausforderung bei der Verwendung von Nanopartikeln besteht daher darin, die Partikel in getrennter Form anzubieten. Mit der bei edelweiss Compositen verwendeten Technologie gelingt es die Nanopartikel weitgehend zu trennen. Dies ist im linken Bild deutlich zu erkennen. Damit können die Nanopartikel ihr volles Verbesserungspotential zum Beispiel im Hinblick auf die Verbesserung von Elastizitätsmodul, mechanischer Stabilität und Verringerung des Polymerisationsschrumpfes ausschöpfen.


Mechanische Eigenschaften und Vorteile:

- Geringer Schrumpf durch Verwendung von Nano-Technologie und hohem Füllgrad von 83 %
- Hervorragendes Abrasionsverhalten
- Sehr gute physikalische sowie mechanische Eigenschaften
- Antibakterielle Oberfläche durch Zink- und Fluoranteile im Füllstoff
- Einfache Polierbarkeit
- Natürliche Fluoreszenz und Opaleszenz

(Quelle: interne Messung edelweiss dentistry)

	COMPOSITE	FLOWABLE	VENEER
Biegefestigkeit	150 MPa	120 MPa	200 MPa
Druckfestigkeit	480 MPa	350 MPa	550 MPa
Biegemodul	12.5 (dentin) -16 GPa (enamel)	6 GPa	19 GPa
Oberflächenhärte	80 HV	68 HV	95 HV
Polymerisationsschrumpf	2.50 %	N.A.	—

Step by Step

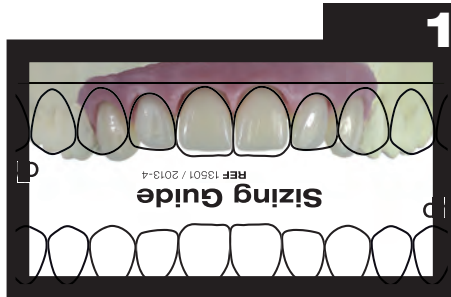


edelweiss VENEER Größenbestimmung mit dem Sizing Guide (einheitliche oder kombinierte VENEER Größen)



Dentin Farbestimmung im Cervikalbereich mit dem Dentin Farbstäbchen.



Dentin Stäbchen in die Enamel-VENEER Schale einlegen. (Vorab Glycerin für die Lichtbrechung in die Schale applizieren)

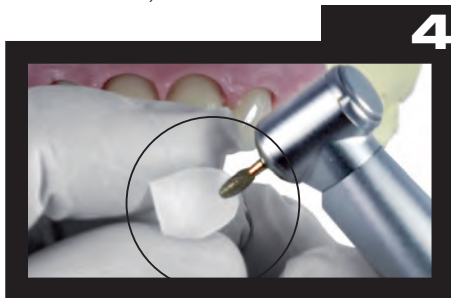

Finieren der marginalen Ränder und anrauen der edelweiss VENEER Innenfläche.




Formanpassung an den Gingival-Verlauf.



Microinvasive Präparation des Zahnes.



Anprobe und visuelle Kontrolle der edelweiss VENEERs.

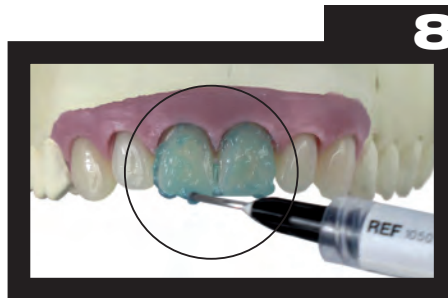

Ätzen mit Ätzel. (Enamel 30- 60 sec., Dentin 15 sec. - danach 20 sec. spülen)



Zähne mit Matrizenbänder separieren.
Dentin/Enamel Bond (Peak Univ., Optibond, etc.) 20 sec. einmassieren. Verblasen für 2 sec.



30 sec. Lichthärten



edelweiss VENEER Bond 30 sec. auf der VENEER Innenseite einmassieren.



20 sec. Lichthärten



Optional: Charakterisierung mit edelweiss Composite Flow. (Mamelons, dunklerer Zahnhals) danach 20 sec. Lichthärten



Reinigen der Handschuhflächen mit Isopropyl Alkohol-Tücher.



Ca. 1 cm langen edelweiss Composite Streifen auf die Fingerspitze auftragen.



Composite Streifen zu einer Kugel rollen.



Composite Kugel mit der Fingerspitze in die Innenseite des VENEER eindrücken.




Composite mit Instrument (Spatel) gleichmäßig im VENEER verteilen.



Die zentralen VENEERs in die gewünschte Position drücken. **TIP:** OP-Licht reduzieren.




Composite-Überschüsse adaptieren.

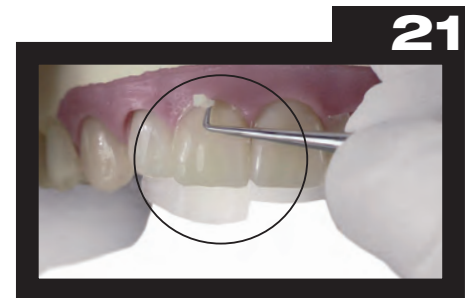

Überschüssiges Composite Material entfernen.




Nach gewünschter Positionierung die zentralen VENEERs, gemeinsam 40 sec. Lichthärten.

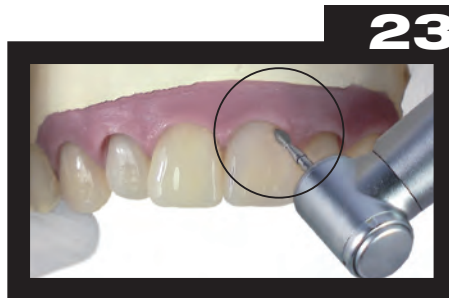


Finieren der zervikalen Ränder.
(Diamant 40 µm/8 µm)



Finieren der Inzisalkanten.
(Diamant 40 µm/8 µm)

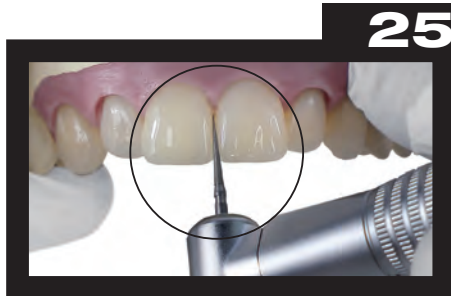

Finieren der Approximalräume.
(Diamant 40 µm/8 µm)

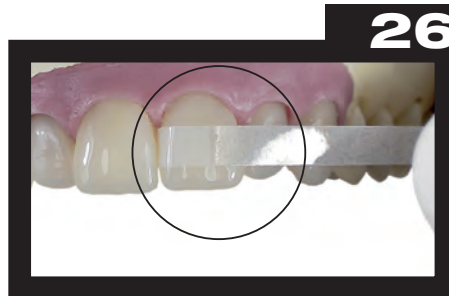


Bearbeiten der Interproximalräume mit Finger-Strips.



Polieren der Interproximalräume mit Polier-Strips.



Polieren des Cervikalbereichs mit Silikon Polierkelchen (Speichelfeucht).

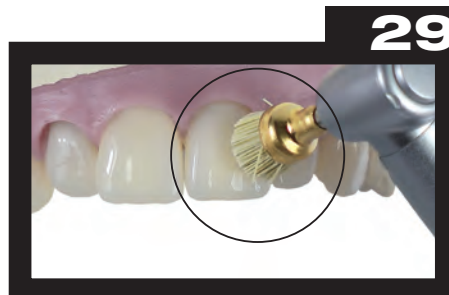

Endpolitur mit Politurbürste.



Fertige Situation.

Toolboxes

STARTER DIRECT SYSTEM VENEER TOOLBOX REF 13710

20	edelweiss VENEERS
1	VENEER CASE S up (1 x 13, 12, 11, 21, 22, 23, S)
1	VENEER CASE M up (1 x 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24 M)
1	VENEER CASE L up (1 x 13, 12, 11, 21, 22, 23 L)
25	edelweiss NANO-HYBRID COMPOSITE DENTIN SHADE
5	Dentin A0 0.3 g Tip
5	Dentin A1 0.3 g Tip
5	Dentin A2 0.3 g Tip
5	Dentin A3 0.3 g Tip
5	Dentin A3.5 0.3 g Tip
5	edelweiss NANO-HYBRID COMPOSITE ENAMEL SHADE
5	Enamel 0.3 g Tip
1	edelweiss NANO-HYBRID COMPOSITE FLOW
1	Enamel Flowable 1.5 g Spritze
2	edelweiss EFFECT SHADES
1	Opaque White 1.5 g Spritze
1	Blue Effect 1.5 g Spritze
1	edelweiss BOND
1	1 VENEER Bond 5 ml Flasche

ACCESSORIES

Dentin & Enamel Shade Guide
 VENEER & OCCLUSIONVD Sizing Guide up & low
 FLOW Applikationsnadeln (10x)
 VENEER & OCCLUSIONVD Step by Step Card
 Gebrauchsanweisungen

ADVANCED DIRECT SYSTEM VENEER & OCCLUSION TOOLBOX REF 13700

36	edelweiss VENEERS
1	VENEER CASE S up (1 x 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24 S)
1	VENEER CASE M up (1 x 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24 M)
1	VENEER CASE L up (1 x 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24 L)
1	VENEER CASE S low (1x 31, 32, 33, 41, 42, 43 S)
1	VENEER CASE M low (1x 31, 32, 33, 41, 42, 43 M)
48	edelweiss OCCLUSIONVD
1	OCCLUSIONVD CASE S up (1 x 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27 S)
1	OCCLUSIONVD CASE M up (1 x 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27 M)
1	OCCLUSIONVD CASE L up (1 x 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27 L)
1	OCCLUSIONVD CASE S low (1 x 34, 35, 36, 37, 44, 45, 46, 47 S)
1	OCCLUSIONVD CASE M low (1 x 34, 35, 36, 37, 44, 45, 46, 47 M)
1	OCCLUSIONVD CASE L low (1 x 34, 35, 36, 37, 44, 45, 46, 47 L)
30	edelweiss NANO-HYBRID COMPOSITE DENTIN SHADE
5	Dentin A0 0.3 g Tip
5	Dentin A1 0.3 g Tip
5	Dentin A2 0.3 g Tip
5	Dentin A3 0.3 g Tip
5	Dentin A3.5 0.3 g Tip
5	edelweiss NANO-HYBRID COMPOSITE ENAMEL SHADE
5	Enamel 0.3 g Tip
1	edelweiss NANO-HYBRID COMPOSITE FLOW
1	Enamel Flowable 1.5 g Spritze
2	edelweiss EFFECT SHADES
1	Opaque White 1.5 g Spritze
1	Blue Effect 1.5 g Spritze
1	edelweiss BOND
1	1 VENEER Bond 5 ml Flasche

ACCESSORIES

Dentin & Enamel Shade Guide
 VENEER & OCCLUSIONVD Sizing Guide up & low
 FLOW Applikationsnadeln (10x)
 VENEER & OCCLUSIONVD Step by Step Card
 Gebrauchsanweisungen

DIRECT SYSTEM



Abnehmbarer Deckel für mehr flexibilität

Refills

edelweiss VENEER CASES REFILLS

REF 13000	edelweiss VENEER CASE 14-24 S up (1 x 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24 S)
REF 13010	edelweiss VENEER CASE 14-24 M up (1 x 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24 M)
REF 13020	edelweiss VENEER CASE 14-24 L up (1 x 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24 L)
REF 13030	edelweiss VENEER CASE 44-34 S low (1 x 44, 43, 42, 42, 31, 32, 33, 34 S)
REF 13040	edelweiss VENEER CASE 44-34 M low (1 x 44, 43, 42, 42, 31, 32, 33, 34 S)
REF 10100	edelweiss VENEER CASE S up (1 x 13, 12, 11, 21, 22, 23 S)
REF 10110	edelweiss VENEER CASE M up (1 x 13, 12, 11, 21, 22, 23, M)
REF 10120	edelweiss VENEER CASE L up (1 x 13, 12, 11, 21, 22, 23 L)
REF 10130	edelweiss VENEER CASE S low (1 x 43, 42, 41, 31, 32, 33 L)
REF 10140	edelweiss VENEER CASE M low (1 x 43, 42, 41, 31, 32, 33 L)

edelweiss VENEER SINGLE REFILLS

REF 10180	edelweiss VENEER 11/21 S (1 x 11, 21 S)
REF 10181	edelweiss VENEER 11/21 M (1 x 11, 21 M)
REF 10182	edelweiss VENEER 11/21 L (1 x 11, 21 L)
REF 10183	edelweiss VENEER 12/22 S (1 x 12, 22 S)
REF 10184	edelweiss VENEER 12/22 M (1 x 12, 22 M)
REF 10185	edelweiss VENEER 12/22 L (1 x 12, 22 L)
REF 10150	edelweiss VENEER 11 S
REF 10151	edelweiss VENEER 11 M
REF 10152	edelweiss VENEER 11 L
REF 10153	edelweiss VENEER 12 S
REF 10154	edelweiss VENEER 12 M
REF 10155	edelweiss VENEER 12 L
REF 10156	edelweiss VENEER 13 S
REF 10157	edelweiss VENEER 13 M
REF 10158	edelweiss VENEER 13 L
REF 10310	edelweiss VENEER 14 S
REF 13101	edelweiss VENEER 14 M
REF 13102	edelweiss VENEER 14 L
REF 13103	edelweiss VENEER 15 S
REF 13104	edelweiss VENEER 15 M
REF 13105	edelweiss VENEER 15 L
REF 10159	edelweiss VENEER 21 S
REF 10160	edelweiss VENEER 21 M
REF 10161	edelweiss VENEER 21 L
REF 10162	edelweiss VENEER 22 S
REF 10163	edelweiss VENEER 22 M
REF 10164	edelweiss VENEER 22 L

REF 10165	edelweiss VENEER 23 S
REF 10166	edelweiss VENEER 23 M
REF 10167	edelweiss VENEER 23 L
REF 13106	edelweiss VENEER 24 S
REF 13107	edelweiss VENEER 24 M
REF 13108	edelweiss VENEER 24 L
REF 13109	edelweiss VENEER 25 S
REF 13110	edelweiss VENEER 25 M
REF 13111	edelweiss VENEER 25 L
REF 10168	edelweiss VENEER 31 S
REF 10169	edelweiss VENEER 31 M
REF 10170	edelweiss VENEER 32 S
REF 10171	edelweiss VENEER 32 M
REF 10172	edelweiss VENEER 33 S
REF 10173	edelweiss VENEER 33 M
REF 13112	edelweiss VENEER 34 S
REF 13113	edelweiss VENEER 34 M
REF 13114	edelweiss VENEER 35 S
REF 13115	edelweiss VENEER 35 M
REF 10174	edelweiss VENEER 41 S
REF 10175	edelweiss VENEER 41 M
REF 10176	edelweiss VENEER 42 S
REF 10177	edelweiss VENEER 42 M
REF 10178	edelweiss VENEER 43 S
REF 10179	edelweiss VENEER 43 M
REF 13116	edelweiss VENEER 44 S
REF 13117	edelweiss VENEER 44 M
REF 13118	edelweiss VENEER 45 S
REF 13119	edelweiss VENEER 45 M

DIRECT OCCLUSION-VD CASE REFILLS

REF 13170	OCCLUSION-VD CASE 17-27 S up (1 x 17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27 S)
REF 13175	OCCLUSION-VD CASE 17-27 M up (1 x 17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27 M)
REF 13180	OCCLUSION-VD CASE 17-27 L up (1 x 17, 16, 15, 14, 24, 25, 26, 27 L)
REF 13185	OCCLUSION-VD CASE 47-37 S low (1 x 47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37 S)
REF 13190	OCCLUSION-VD CASE 47-37 M low (1 x 47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37 M)
REF 13195	OCCLUSION-VD CASE 47-37 L low (1 x 47, 46, 45, 44, 34, 35, 36, 37 L)
REF 13150	OCCLUSION-VD SET 17-14 S up (1 x 17, 16, 15, 14 S)
REF 13151	OCCLUSION-VD SET 17-14 M up (1 x 17, 16, 15, 14 M)
REF 13152	OCCLUSION-VD SET 17-14 L up (1 x 17, 16, 15, 14 L)
REF 13153	OCCLUSION-VD SET 24-27 S up (1 x 24, 25, 26, 27 S)
REF 13154	OCCLUSION-VD SET 24-27 M up (1 x 24, 25, 26, 27 M)
REF 13155	OCCLUSION-VD SET 24-27 L up (1 x 24, 25, 26, 27 L)

REF 13156	OCCLUSION-VD SET 34-37 S low (1 x 34, 35, 36, 37 S)
REF 13157	OCCLUSION-VD SET 34-37 M low (1 x 34, 35, 36, 37 M)
REF 13158	OCCLUSION-VD SET 34-37 L low (1 x 34, 35, 36, 37 L)
REF 13159	OCCLUSION-VD SET 47-37 S low (1 x 47, 46, 45, 44 S)
REF 13160	OCCLUSION-VD SET 47-37 M low (1 x 47, 46, 45, 44 M)
REF 13161	OCCLUSION-VD SET 47-37 L low (1 x 47, 46, 45, 44 L)

DIRECT OCCLUSION-VD SINGLE REFILLS

REF 13200	OCCLUSION-VD 14 S
REF 13201	OCCLUSION-VD 14 M
REF 13202	OCCLUSION-VD 14 L
REF 13203	OCCLUSION-VD 15 S
REF 13204	OCCLUSION-VD 15 M
REF 13205	OCCLUSION-VD 15 L
REF 13206	OCCLUSION-VD 16 S
REF 13207	OCCLUSION-VD 16 M
REF 13208	OCCLUSION-VD 16 L
REF 13209	OCCLUSION-VD 17 S
REF 13210	OCCLUSION-VD 17 M
REF 13211	OCCLUSION-VD 17 L
REF 13212	OCCLUSION-VD 24 S
REF 13213	OCCLUSION-VD 24 M
REF 13214	OCCLUSION-VD 24 L
REF 13215	OCCLUSION-VD 25 S
REF 13216	OCCLUSION-VD 25 M
REF 13217	OCCLUSION-VD 25 L
REF 13218	OCCLUSION-VD 26 S
REF 13219	OCCLUSION-VD 26 M
REF 13220	OCCLUSION-VD 26 L
REF 13221	OCCLUSION-VD 27 S
REF 13222	OCCLUSION-VD 27 M
REF 13223	OCCLUSION-VD 27 L
REF 13224	OCCLUSION-VD 34 S
REF 13225	OCCLUSION-VD 34 M
REF 13226	OCCLUSION-VD 34 L
REF 13227	OCCLUSION-VD 35 S
REF 13228	OCCLUSION-VD 35 M
REF 13229	OCCLUSION-VD 35 L
REF 13230	OCCLUSION-VD 36 S
REF 13231	OCCLUSION-VD 36 M
REF 13232	OCCLUSION-VD 36 L
REF 13233	OCCLUSION-VD 37 S
REF 13234	OCCLUSION-VD 37 M
REF 13235	OCCLUSION-VD 37 L
REF 13236	OCCLUSION-VD 44 S
REF 13237	OCCLUSION-VD 44 M
REF 13238	OCCLUSION-VD 44 L
REF 13239	OCCLUSION-VD 45 S
REF 13240	OCCLUSION-VD 45 M

REF 13241	OCCLUSION-VD 45 L
REF 13242	OCCLUSION-VD 46 S
REF 13243	OCCLUSION-VD 46 M
REF 13244	OCCLUSION-VD 46 L
REF 13245	OCCLUSION-VD 47 S
REF 13246	OCCLUSION-VD 47 M
REF 13247	OCCLUSION-VD 47 L

NANO-HYBRID COMPOSITE DENTIN SHADES

REF 10201	Dentin A0	15 x 0.3 g Tip
REF 10211	Dentin A1	15 x 0.3 g Tip
REF 10221	Dentin A2	15 x 0.3 g Tip
REF 10231	Dentin A3	15 x 0.3 g Tip
REF 10241	Dentin A3.5	15 x 0.3 g Tip

NANO-HYBRID COMPOSITE ENAMEL SHADE

REF 10301	Enamel	10 x 0.3 g Tip
-----------	--------	----------------

EFFECT SHADES

REF 13760	Blue Effect	1.5 g Spritze
REF 13750	Opaque White	1.5 g Spritze

NANO-HYBRID COMPOSITE FLOW

REF 13770	Enamel Flowable	1.5 g Spritze
-----------	-----------------	---------------

BONDING

REF 10521	VENEER Bond	5 ml Flasche
-----------	-------------	--------------

ACCESSORIES

REF 14600	Dentin & Enamel Shade Guide
REF 13508	VENEER Sizing Guide up & low
REF 13509	OCCLUSION-VD Sizing Guide up & low
REF 10621	FLOW Application Tips (10x)
REF 11959	VENEER Step by Step Card

PROMOTION TOOLS

Patienten Flyer mit Dispenser
Indication Guide
Promotion Poster
Promotion DVD



edelweiss
DENTISTRY

edelweiss dentistry products gmbh • Ruckburg Allgäustraße 5 • 6912 Hörbranz - Austria
Tel: +43 (0)5573 835 98-0 • Fax: +43 (0)5573 835 98-7 • office@edelweiss-dentistry.com
www.edelweiss-dentistry.com



14802/01-2014